

76-98

Sprühpflaster

Ochranný plastický obväz na báze akrylátového kopolyméru



Oblasť použitia:

Rýchle ošetrenie drobných poranení pokožky a odrenín.

Spôsob použitia :

Sprej najskôr dôkladne pretrepte a prípravok aplikujte postrekom priamo na poranené miesto alebo odreninu zo vzdialenosti 5 až 20 cm tak, aby z ošetrovaného miesta nestekal. Po nanosení zasychá do 2 minút. Nanášajte vždy len 1 vrstvu, aby nedochádzalo k spomaleniu procesu hojenia. K odstráneniu ochranného filmu z pokožky dochádza samovoľne v priebehu niekoľkých dní.

Upozornenie: Nepoužívajte na ošetrenie poranenia v oblasti očí, slizníc, popálenín, hlbokých a zapálených rán.

Vlastnosti výrobku :

Sprühpflaster vytvára na povrchu pokožky priedušný, vode odolný, číry, ochranný film, ktorý zabraňuje kontaminácii rán mikroorganizmami a urýchľuje proces hojenia. Nezabraňuje perspirácii pokožky. Ideálny pre použitie vo vlhkom a prašnom prostredí, v ktorom iné typy obväzov zlyhávajú.

- Priedušný
- Nelepivý
- Vode odolný
- Číry
- Bez zápachu
- Jednoduchá aplikácia

Zloženie:

Acetón, Isobután, Alcohol denat., Acrylat Copolymer, Voda, Bután, Propán

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzná pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.